



# *Manual de Instruções* **Imersor de Cera Multimega**



## Manual de operação

### Imersor de cera MultiMega



Código	Energia	AMP	Fusível	Temp	comprimento	profundidade	altura	peso
09-304	bivolt	200W	5A	50°C~120°C	200mm	146mm	70mm	0,69kg

#### Modo de uso

1- Conectar o cabo de força



2- Ligar o botão lateral




3- Ao apertar um dos botões, o reservatório é ligado e a temperatura irá subir até o nível desejado. Para desligar o reservatório basta apertar o botão novamente.



4- Escolha o modo de exibição da temperatura em C° ou F° 

5- A primeira linha indica a temperatura escolhida, e a segunda linha indica a temperatura atual de cada reservatório.

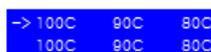

6- Para selecionar a temperatura desejada, pressione as teclas para Cima/Baixo. Para

subir/descer a temperatura rapidamente, mantenha a tecla pressionada.



#### Precauções:

- 1- Cuidado, não toque no reservatório, evitando queimaduras.
- 2- Não manje com as mãos úmidas ou molhadas.
- 3- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico.
- 4- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.
- 5- Não dobre ou esmague o cabo de energia.
- 6- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento.
- 7- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período.
- 8- Não use o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira.

Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.

#### Garantia OdontoMega

##### Garantia legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela **OdontoMega** dentro do período de garantia legal.

##### Garantia estendida

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições, e com certificação europeia CE. Desde modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pelo **Consumidor** dentro do período de garantia estendida.