



# *Manual de Instruções* **Imersor de Cera Unimega**



## Manual de operação

### Imersor de cera UniMega



| Código | Energia | AMP | Fusível | Temp       | comprimento | profundidade | altura | peso   |
|--------|---------|-----|---------|------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 09-303 | bivolt  | 60W | 2A      | 50°C~120°C | 108mm       | 137mm        | 70mm   | 0,88kg |

#### Modo de uso

1- Conectar o cabo de força



2- Ligar o botão lateral



3- Escolha o modo de exibição da temperatura em C° ou F°



4- Usando as teclas para Cima/Baixo, escolha a temperatura desejada.



Para aumentar/diminuir rapidamente, mantenha as teclas pressionadas.

5- A temperatura selecionada é indicada por S e a temperatura atual é indicada por C



6- Quando o equipamento estiver em aquecimento o LED  ficará piscando. Quando chegar na temperatura selecionada, o led irá apagar.

### **Em caso de problemas:**

**-Um sinal de erro aparece no visor e um aviso sonoro é disparado: ligue e desligue o equipamento**

### **Precauções:**

- 1- Cuidado, não toque no reservatório, evitando queimaduras.**
- 2- Não utilizar com as mãos úmidas ou molhadas.**
- 3- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico.**
- 4- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.**
- 5- Não dobre ou esmague o cabo de energia.**
- 6- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento.**
- 7- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período.**
- 8- Não use o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira.**

**Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.**