




# *Manual de Instruções* **JET STEAM**



# Identificação das partes

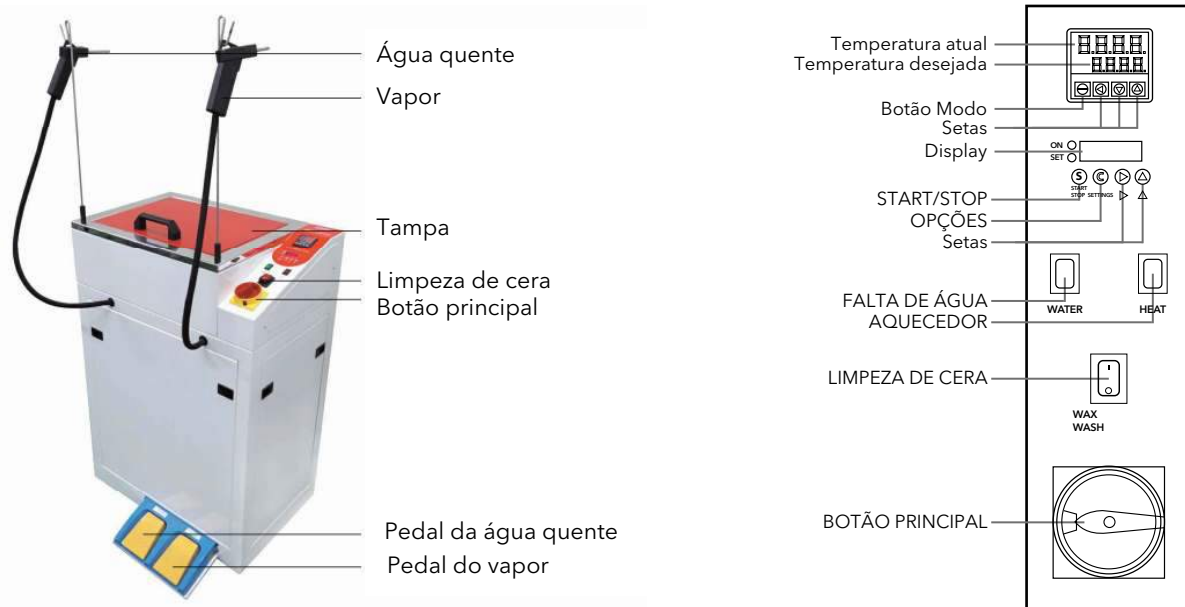

## Modo de uso

### Vapor e Água quente

- 1) Ligue o botão principal.
- 2) O vapor e a água quente estarão prontos para serem usados quando a temperatura do vapor mostrada no display atingir a temperatura desejada (ex. 140°C).

### Limpeza de Cera

- 1) Posicione o modelo ou a peça a ser limpa dentro da câmara de limpeza de cera e ligue o botão principal e o botão de limpeza de cera.
- 2) Quando a temperatura mostrada no display atingir a temperatura desejada, o tempo de manutenção será ativado.

### Tempo de Manutenção

Pressionando o botão opções o tempo de manutenção é ajustado, utilizando as setas. Pressione o botão START/STOP e o tempo de manutenção será salvo na memória.

Especificações	
Medidas (mm)	L600 x P400 x A930
Peso	60Kg
Consumo	2.5Kw
Voltagem & Hertz	220V, 50/60Hz



OdontoMega Import R. Rui Barbosa, 640 CEP 14015-120 Ribeirão Preto - SP

Tel.: (16) 3610.9636 odontomega@odontomega.com.br

CNPJ: 01.380.483/0001-60 I.E: 582427898117

www.odontomega.com.br