



# ***Manual de Instruções*** ***Vibrador Power***



## Manual de operação

### Vibrador Power



Código	Energia	AMP	Fusível	Temp	comprimento	profundidade	altura	peso
09-201	110v	360W	4A		230mm	220mm	110mm	6,9kg
09-201b	220v	360W	4A		230mm	220mm	110mm	6,9kg

#### Modo de uso

- 1- Ligue o equipamento na chave frontal, após conectar o cabo de força na tomada
- 2- Selecione o tamanho de onda desejada, curta ou longa
- 3- Ajuste a intensidade da vibração na manopla



#### Precauções:

- 1- Não manje com as mãos úmidas ou molhadas.
- 2- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico.
- 3- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.
- 4- Não dobre ou esmague o cabo de energia.
- 5- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento.
- 6- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período.

Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.

#### Garantia OdontoMega

##### Garantia legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela **OdontoMega** dentro do período de garantia legal.

##### Garantia estendida

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições, e com certificação europeia CE. Desde modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pelo **Consumidor** dentro do período de garantia estendida.