




# *Manual de Instruções* ***Gotejador Wax Pencil II***

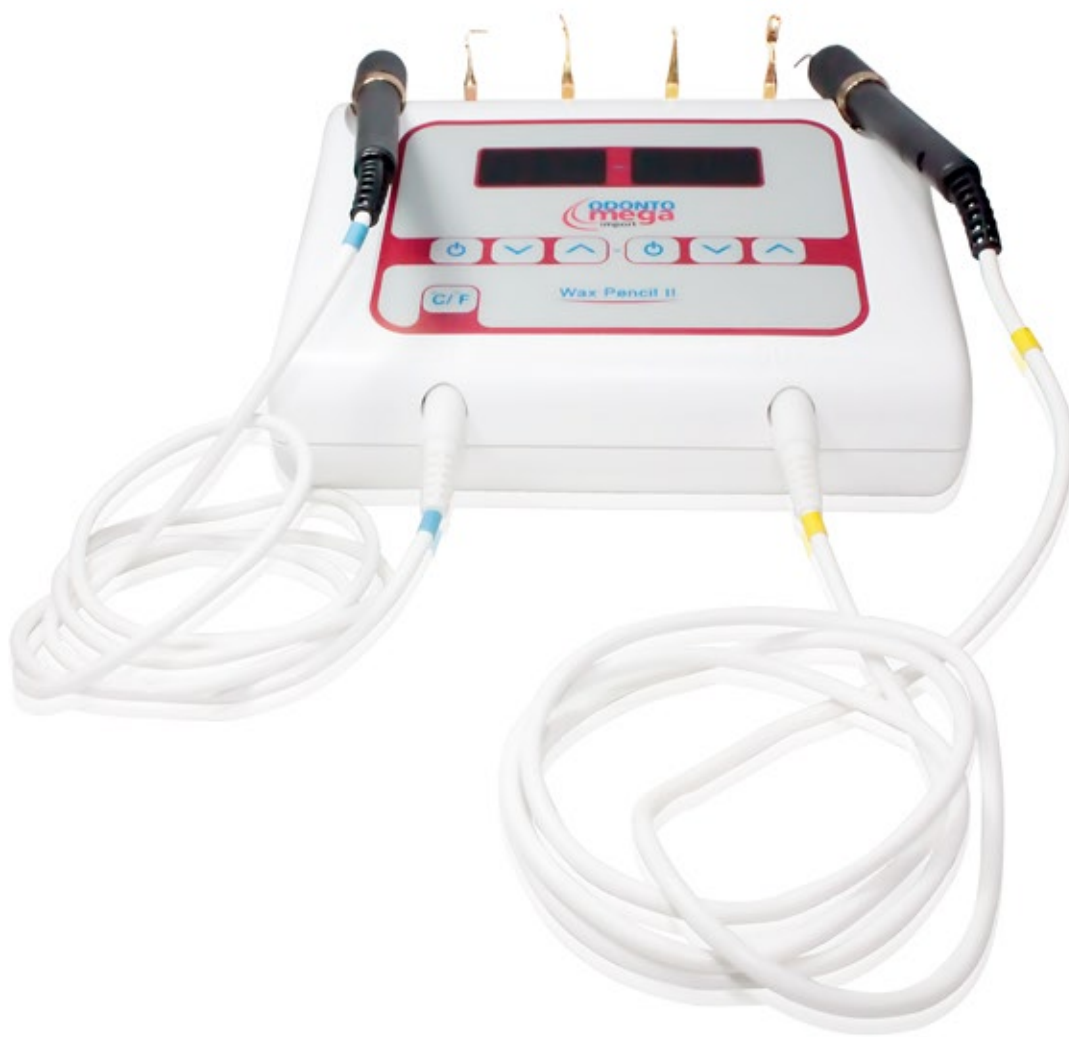

## Manual de operação

### Gotejador Wax Pencil II



Código	Energia	AMP	Fusível	Temp	comprimento	profundidade	altura	peso
09-301	bivolt	20W	2A	50°C~200°C	152mm	123mm	70mm	0,4kg

#### Modo de uso

1- Conectar o cabo de força



2- Ligar o botão lateral



3- Ligar a caneta desejada



4- Escolha a ponta e conecte na caneta,

em seguida conecte a caneta no equipamento



5- Usando as teclas para Cima/Baixo, escolha a temperatura desejada.

Para aumentar/diminuir rapidamente, mantenha as teclas pressionadas.



6- Escolha o modo de exibição da temperatura em C° ou F°



Em caso de problemas:

-Um sinal de erro aparece no visor e um aviso sonoro é disparado: ligue e desligue o equipamento

Precauções:

- 1- Cuidado com a ponta da caneta, e não toque nela enquanto o equipamento estiver ligado ou logo após ser desligado. Espere até esfriar para trocar a ponta.
- 2- Não manuseie com as mãos úmidas ou molhadas.
- 3- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico.
- 4- Não deixe a ponta do equipamento tocar cabos de energia.
- 5- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.
- 6- Não dobre ou esmague o cabo de energia.
- 7- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento.
- 8- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período.
- 9- Não use o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira.

Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.

Garantia OdontoMega

Garantia legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela **OdontoMega** dentro do período de garantia legal.

Garantia estendida

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições, e com certificação europeia CE. Desde modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pelo **Consumidor** dentro do período de garantia estendida.

OdontoMega Import R. Rui Barbosa, 640 CEP 14015-120 Ribeirão Preto – SP Tel.: (16) 3610.9636

odontomega@odontomega.com.br

CNPJ: 01.380.483/0001-60 I.E: 582427898117

www.odontomega.com.br