



Manual de Instruções **Jet Stream**



1. Produto

Parabéns. Você acaba de adquirir um equipamento com garantia de qualidade e durabilidade. Por favor, siga as orientações desse manual para obter os melhores resultados de seu aspirador.

- A- Guarde a caixa e espumas originais. Se no futuro precisar enviar o produto para realizar manutenção ou consertos, o envio e retorno será feito livre de danos ao produto.
- B- Sempre utilize o equipamento em tomadas com aterramento.
- C- Não utilize adaptadores.
- D- Utilize apenas filtros originais.
- E- Sempre desconecte o equipamento da energia antes de realizar quando troca de filtro ou manutenção.
- F- Em caso de utilização contínua por mais de 3 horas, o equipamento pode esquentar. Caso utilize o equipamento durante muitas horas, deixe-o esfriar por 1 hora entre as operações.

Dados técnicos

Voltagem	220V
Poder de sucção	3720L/Min
Potência	1.200W
Filtragem	99,9% das impurezas
Nível de ruído	55dbA
Medidas	38x33x28cm 13kg
Motor Infinity	Até 3000 horas de vida útil

2. Instalação


- A- Retire o equipamento da caixa com as 2 mãos. Se necessário, peça ajuda de outra pessoa.
- B- Mantenha o aspirador em um local limpo, seco e arejado.
- C- Ligue a mangueira fornecida ao equipamento a ser aspirado. Se necessário, utilize a conexão "T" para conectar a 2 equipamentos simultaneamente.
- D- Ligue cabo de energia no equipamento, e posteriormente na tomada 220V.
- E- Ligue o botão ON/OFF do equipamento. A velocidade da sucção pode ser controlada no equipamento, pela manopla (Caso tenha interesse, também pode ser adquirido como acessório opcional um "controle-remoto" ou um pedal para acionar o equipamento).

3. Manutenção

- A- **Filtro do aspirador:** O Jet Stream vem equipado com um filtro Antimicrobico que acumula a poeira o material aspirado. Quando notar uma redução significativa no poder de sucção, indicamos a

substituição do filtro (não tente limpar o filtro, pois isso pode rasga-lo, e com o uso queimar o motor).

- B- Para substituir o filtro do aspirador Jet Stream:** (1) Abra as 2 tarraxas pretas na lateral do equipamento. (2) Remova a porta. (3) Deslize a entrada do filtro do cano, para facilitar incline para frente levemente. (4) Antes de instalar o novo filtro, limpe a poeira de dentro do equipamento para aumentar a vida útil do motor. (5) Insira o novo filtro, com cuidado para não danificar o filtro HEPA. (6) Certifique-se que o filtro está bem instalado antes de fechar a porta lateral. **ANVISO: NÃO UTILIZE O ASPIRADOR SEM UM FILTRO NO LUGAR CORRETO. ISSO PODE QUEIMAR O MOTOR.**
- C- Filtro HEPA:** Se mesmo com um filtro novo, você ainda notar uma sucção menor, talvez seja a hora de trocar o filtro HEPA. Geralmente essa troca é necessária a cada 2 anos. Para remover o filtro HEPA, remova o Filtro normal pela portal lateral, e remova os parafusos de plástico segurando o filtro HEPA na parede do Aspirador. Você pode prolongar o uso do filtro HEPA, com o seguinte procedimento: (1) Remova-o do aspirador. (2) Contra uma parede ou superfície dura, bata com cuidado, de modo que as partículas se desgrudem e limpe o filtro. (3) Instale novamente no aspirador.
- D- Troca de motor Infinity:** (1) Abra a porta lateral do motor, removendo 6 parafusos. **(2) Retire o motor usado e substitua pelo novo com cuidado para que todas as partes sejam conectadas corretamente.**

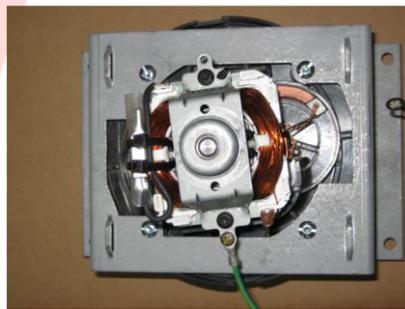

Instale corretamente o cabo da foto, isso é muito importante para os motores Infinity.

E- Guia de problemas e soluções:

Sintoma	Possível Causa	Sugestão de solução
O aspirador não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Problema na energia • "Circuit Breaker" para fora • Motor queimado • Utilizando adaptador 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque o fusível "Circuit Breaker" • Resete o Circuit Breaker • Troque o motor • Retire o adaptador
Barulho excessivo	<ul style="list-style-type: none"> • O motor está encostando no equipamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Troque o motor ou ajuste sua posição
Sucção insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Obstrução no sistema • Filtro entupido 	<ul style="list-style-type: none"> • Remova a obstrução • Troque o filtro
O motor desliga	<ul style="list-style-type: none"> • Amperagem de entrada muito alta • Motor está queimado 	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o filtro está no lugar • Troque o motor
Sucção excessiva	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro não está no lugar 	<ul style="list-style-type: none"> • Instale o filtro corretamente

A sucção varia entre as bancadas ou equipamentos	<ul style="list-style-type: none">• O tamanho das mangueiras de sucção varia entre as bancadas	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste as mangueiras
--	--	--

4. Acessórios e reposições

A- Reposições

01-700 | Filtro do aspirador Jet Stream com 5 unidades

01-701 | Filtro HEPA Jet Stream

01-721 | Motor do aspirador Jet Stream

B- Acessórios

01-713 | Pedal para acionamento

01-714 | Controle remoto ON/OFF

5. Garantia

O equipamento possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, quando comprovados pelo setor responsável. A garantia deverá cobrir reparos e manutenção pertinentes, sem a obrigação de trocar o produto. O transporte para eventuais manutenções será pago pela **OdontoMega** dentro do período de garantia legal de 3 meses. Em caso de manutenção ou garantia no período da garantia estendida (9 meses restantes) o transporte deverá ser pago pelo **Consumidor**.

A garantia **NÃO** cobre:

- 1- Mau uso.
- 2- Manutenção realizada por pessoal não autorizado.
- 3- Manutenção ou uso feita em desacordo com as instruções deste manual.
- 4- Motivos de força maior, como descargas elétricas, incêndios, etc.
- 5- Partes de desgaste natural como carvões, filtros, motor.

Para maiores informações contate a OdontoMega.

OdontoMega import
Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto – SP
CEP 14015-120
Tel.: +55 16 3610 9636
odontomega@odontomega.com.br
www.odontomega.com.br