



MANUAL DE OPERAÇÃO

Vibrador Power



(16) 3610-9636
www.odontomega.com.br
odontomega@odontomega.com.br

GARANTIA ODONTOMEGA

Garantia Legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

1. A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
2. A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
3. Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
4. Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será **pago pela OdontoMega** dentro do período de garantia legal.

Garantia Estendida

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições e com certificação europeia CE. Deste modo também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

1. A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
2. A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
3. Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
4. Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será **pago pelo consumidor** dentro do período de garantia estendida.



CÓDIGO	ENERGIA	AMP	FUSÍVEL	TEMP.	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
09-211	110V	360W	4A	-	270mm	210mm	100mm	7 kg
09-212	220V	360W	4A	-	270mm	210mm	100mm	7 kg

MODO DE USO



1. Ligar o equipamento na chave frontal após conectar o cabo de energia na tomada.



2. Selecionar o tamanho da onda desejada: Curta ou Longa.



3. Ajustar a intensidade de vibração na manopla.

PRECAUÇÃO

1. **Não manejar** com as mãos úmidas ou molhadas;
2. **Não desmontar** o equipamento sem conhecimento técnico;
3. **Não usar** o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.
4. **Não dobrar** ou amassar o cabo de energia;
5. **Não bloquear** a saída da ventilação na parte inferior do equipamento;
6. **Desconectar** da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período;
7. **Não usar** o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira.
8. **Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos nos contatar imediatamente.**



Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120

E-mail: odontomega@odontomega.com.br

Telefone: (16) 3610-9636

Site: www.odontomega.com.br