



ODONTOMEGA

# LUNAR Compo

Sistema de Caracterização Estética à base de Compósito Fotopolimerizável



Instruções de uso

odontomega.com.br

Fabricado por

MEDIFIVE Co., Ltd

Importado por Odontomega R Rui Barbosa, 640 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 01.380.483/0001-60 Resp. Técnica: Thernis Aidar CRBM 22360, Registro ANVISA: 10352049020

Tel.: (16) 3610-9636 // WhatsApp: (16) 3610-9636

## Informações gerais

A Maquiagem 3D LUNAR Compo é um sistema de caracterização estética fotopolimerizável com alta carga cerâmica para peças odontológicas impressas em 3D, resina acrílica, resina composta e PMMA, compatível com fornos foto já existentes no laboratório ou clínica, permitindo aplicar cor, textura e brilho na própria finalização.

## Finalidade pretendida

Para obter uma superfície lisa, resistência ao desgaste e aparência natural nos dentes restaurados. Seja em impressão 3D, PMMA ou resina acrílica.

## Indicações

Para adicionar cor e brilho à superfície das restaurações, siga as instruções:

- Restaurações impressas em resina 3D
- Restaurações em resina acrílica de modo geral
- PMMA

## Composição

Acrílato multifuncional, iniciador e pigmento.

## Precauções

- Antes da aplicação, verifique a presença de agentes contaminantes, impurezas ou quaisquer defeitos físicos.
- Não utilize o produto fora do prazo de validade.
- Feche a tampa do frasco ou da seringa imediatamente após o uso para evitar contaminação por poeira e polimerização indesejada por luz ambiente.
- Leia e siga as instruções do fabricante incluídas neste manual.

## Precaução antes do uso

- Após dar forma à restauração, finalize a superfície com uma broca de carboneto ou uma ponta de silicone grossa.
- Limpe a superfície com um jato de água ou limpador a vapor e depois seque bem.

## Como usar

- Coloque uma quantidade pequena do produto em um godê adequado.
- Caso seja necessário diluição, adicione LUNAR Compo Glaze (Clear ou Clear Fluo) ou LUNAR Compo Clear.
- Misture delicadamente para evitar bolhas de ar.
- Aplique imediatamente na superfície com um pincel adequado.
- Aplique os compostos de cores LUNAR Compo até obter a tonalidade desejada e deixe secar por 30 a 60 segundos.
- Aplique uma camada final fina de LUNAR Compo Glaze e cure com um dispositivo de cura UV adequado (ex.: Phrozen Cure V2: 5-10 minutos).

\*Opções de camadas: (1) Stain > (2) Glaze, ou (1) Glaze > (2) Stain > (3) Glaze.

## Como armazenar e gerenciar após o uso

- Não reutilize o material restante após a mistura no godê.
- Após o uso, feche imediatamente a tampa do frasco ou da seringa.
- Armazene longe de altas temperaturas e abrigado de luz solar direta e luz ambiente, assim como protegido de umidade.

## Contraindicações

Evite o uso em pacientes com alergia conhecida a monômeros de acrílato e metacrílico e/ou polímeros de acrílato e metacrílico. As reações podem variar de irritação cutânea a choque anafilático grave.

## Armazenagem

Recomenda-se armazenagem entre 2 e 27 °C para um desempenho ideal.

## Cuidados

- Produto destinado a uso exclusivamente odontológico.
- Utilizar em local bem ventilado.
- Usar luvas de proteção, óculos e máscara.
- Em caso de contato com a pele, lave a área com água corrente.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente e procure atendimento médico.

## Produtos disponíveis para venda

| Produtos    | Componentes                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kit PRO     | LUNAR Compo Glaze x 2 frascos (Transparente, Transparente Fluorescente)                                                                                                         |
|             | LUNAR Compo 3g x 16 seringas (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Blue, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red) |
| Indivisuais | LUNAR Compo Glaze x 2 frascos (Transparente, Transparente Fluorescente)                                                                                                         |
|             | LUNAR Compo 3g x 16 seringas (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Blue, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red) |

## Isonção de responsabilidade

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. Deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções de uso. A MEDIFIVE Co., Ltd. reconhece sua responsabilidade em substituir produtos comprovadamente defeituosos. A MEDIFIVE Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas diretas e indiretas resultantes do uso ou da impossibilidade de uso do produto descrito. Antes de usar o produto, é responsabilidade do usuário determinar sua adequação ao uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades relacionados ao seu uso.

## Pictogramas

|  |                       |  |                                |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|
|  | Fabricante            |  | Consulte as instruções de uso. |
|  | Limite de temperatura |  | Data de validade               |
|  | Código do lote        |  | Mantenha longe da luz solar.   |
|  | Cuidado               |  | Data de fabricação             |