

ELIMINAÇÃO DE RESINAS PRINTAX PRESS NO FORNO DE ANEL

- **Temperatura de entrada:** 950°C
- Utilizar sempre o anel quente, 15-20 minutos após vazar.
- Posicionar o anel no forno com a abertura virada para baixo, com ângulo de 45° (vide imagem abaixo), facilitando o escoamento e evaporação da resina.

Tempo de permanência: 30 minutos.

Conceitos para a Press & Cast Blue, Green e B1

Protocolo por Thiago Bin Dental Designer

