



ODONTOMEGA

LUNAR Compo

Sistema de Caracterização Estética à base de Compósito Fotopolimerizável



Instruções de uso



www.odontomega.com.br

Fabricado por

MEDIFIVE Co., Ltd

Importado por Odontomega R Rui Barbosa, 640 - Ribeirão Preto
- SP CNPJ: 01.380.483/0001-60 Resp. Técnica: Themis Aida
CRBM 22360. Registro ANVISA: 10352049020

Tel. (16) 3610-9636 WhatsApp: (16) 3610-9636

Informações gerais

A Maquiagem 3D LUNAR Compo é um sistema de caracterização estética fotopolimerizável para peças odontológicas impressas em 3D, resina acrílica, resina composta e PMMA, compatível com fornos foto já existentes no laboratório ou clínica, permitindo aplicar cor, textura e brilho na própria finalização.

Finalidade pretendida

Para obter uma superfície lisa, resistência ao desgaste e aparência natural nos dentes restaurados.

Indicações

Para adicionar cor e brilho à superfície das restaurações, siga as instruções abaixo:

- Dentes artificiais de resina; base de prótese acrílica
- Resina composta indireta
- Objetivo da impressão 3D

Composição

Acrilato multifuncional, iniciador, pigmento

Precaução

- (1) Antes de usar o produto, inspecione-o para verificar a presença de substâncias estranhas, impurezas ou quaisquer defeitos físicos.
- (2) Não utilize o produto após o prazo de validade.
- (3) Feche a tampa do frasco ou da seringa imediatamente após o uso para evitar contaminação por poeira e luz ambiente.
- (4) Leia o manual de instruções do fabricante e siga as instruções de uso.

Preparação antes do uso

- (1) Após dar forma à restauração, finalize a superfície com uma broca de carboneto ou uma ponta de silicone grossa.
- (2) Limpe a superfície com um jato de água ou limpador a vapor e depois seque.

Como usar

- (1) Uma pequena quantidade do produto foi distribuída em um palete.
- (2) Caso seja necessário diluir, adicione LUNAR Compo Glaze (Clear/ Clear Flu) ou LUNAR Compo Clear.
- (3) Misture delicadamente para evitar bolhas de ar.
- (4) Aplique imediatamente na superfície com um pincel.
- (5) Aplique o composto colorido LUNAR até obter a tonalidade desejada e deixe secar por 30 a 60 segundos.
- (6) Aplique uma camada final fina de LUNAR Comp Glaze e cure com um dispositivo de cura UV adequado (ex.: Twin Cure: 5 min).

*Opções de camadas: (1) Stain > (2) Glaze, ou > (1) Glaze > (2) Stain > (3) Glaze.

Como armazenar e gerenciar após o uso

- (1) Não reutilize o material restante após a mistura no palete. (2) Após o uso, feche imediatamente a tampa do frasco ou da seringa.
- (3) Armazene longe de altas temperaturas, luz solar direta e ambientes com alta umidade.

Contraindicações

Evite o uso em pacientes com alergia conhecida a monômeros de acrilato e metacrilato e/ou polímeros de acrilato e metacrilato. As reações podem variar de irritação cutânea a anafilaxia grave.

Armazenar

Recomenda-se armazenar entre 2 e 27 °C para um desempenho ideal.

Cuidado

- (1) Uso exclusivamente odontológico.
- (2) Utilizar em local bem ventilado.
- (3) Usar luvas de proteção, óculos de proteção e máscara.
- (4) Em caso de contato com a pele, lavar com água. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e procurar atendimento médico.

Unidades de Venda

Produtos	Componentes
Kit PRO	LUNAR Compo Glaze 5g x 2 frascos (Transparente, Transparente Fluorescente) LUNAR Compo 3g x 16 seringas (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Blue, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red)
Individuais	LUNAR Compo Glaze 5g (Transparente, Fluorescente Transparente) LUNAR Compo 3g (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Blue, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red)

Isenção de responsabilidade

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. Deve ser processado estritamente de acordo com as instruções de uso. A MEDIFIVE Co., Ltd. reconhece sua responsabilidade em substituir produtos comprovadamente defeituosos. A MEDIFIVE Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas diretos ou indiretos resultantes do uso ou da impossibilidade de uso do produto descrito. Antes de usar o produto, é responsabilidade do usuário determinar sua adequação ao uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades relacionados ao seu uso.

Pictogramas

	Fabricante		Consulte as instruções de uso.
	Limite de temperatura		Data de validade
	Código do lote		Mantenha longe da luz solar.
	Cuidado		Data de fabricação