



ODONTOMEGA

Guia Rápido

BLAZIR

FORNO PARA SINTERIZAÇÃO DE ZIRCÔNIA



- 1• Siga a primeira parte deste guia para posicionar corretamente as resistências do forno.
- 2• Conecte o forno em uma alimentação de 230V.
- 3• De Start em um programa.



Inserindo as resistências e conectando o cabo de energia

Ferramentas necessárias: 2 chaves nº 10, 1 chave Philips nº 2.

1. Remover a tampa do topo do forno desparafusando com a chave Philips nº 2. Manter os 4 parafusos para recolocá-los.

Conteúdo: 4 resistências e 3 fitas metálicas.

1. Inserir com extremo cuidado as 4 resistências nos locais designados. As resistências são frágeis.
2. Conectar as resistências com as fitas metálicas na posição correta, de acordo com a figura 1 utilizando duas chaves nº 10. Apertar as chaves em direções opostas.
3. As duas resistências frontais necessitam de cabos de energia conforme a figura 1.
4. Verificar para que o T/C não toque nas fitas metálicas.
5. Coloque novamente a tampa do fornor com a chaminé. Certifique-se de que a chaminé está posicionada conforme o furo. Feche os 4 parafusos.
6. Quando tudo estiver corretamente fechado e conectado ligue o cabo de energia do forno na tomada e ligue o forno no botão traseiro.
7. Após ligar o forno a logo irá aparecer por alguns segundos e depois a tela inicial do forno. Existem três maneiras de operar o forno:

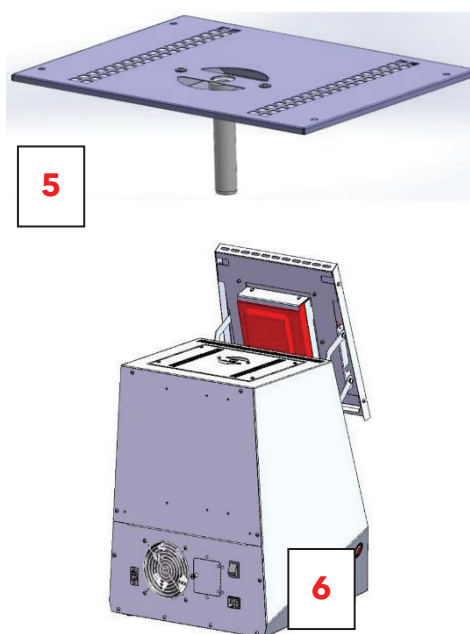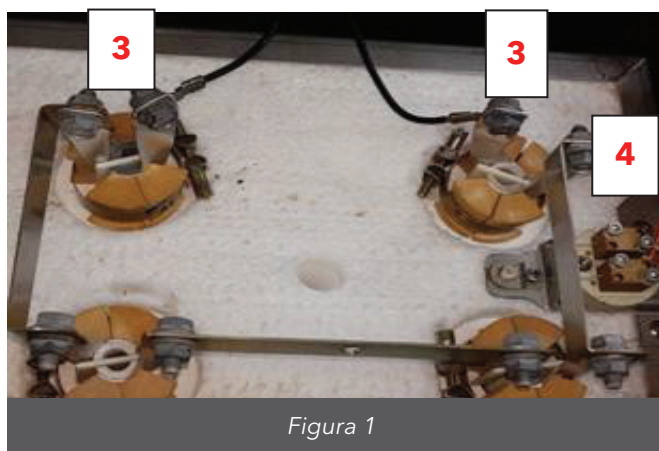

1. Adicionar um programa novo.
2. Sistema “VIA”, veja no manual completo.
3. Selecionar programas já existentes (blocos ZirkOM).

• NOVO PROGRAMA




Criar um novo programa que não está configurado previamente.
Selecionar o ícone “Novo Programa” na tela principal.




Existem dois métodos para criar um novo programa.

- > Selecionar a marca de zircônia na lista e editar o nome.
- > Após criar um nome colocar os parâmetros manualmente.

Com o forno Blazir é possível programar qualquer tipo de parâmetro e qualquer tipo de pamar de acordo com o ciclo indicado pelo fabricante da zircônia.

Em caso de erro, o campo programado ficará vermelho, indicando que o parâmetro não pode ser programado ou está faltando.

No final da programação apertar o botão de salvar  posteriormente apertar a seta  para chegar na tela do gráfico e depois apertar Start para iniciar o programa .

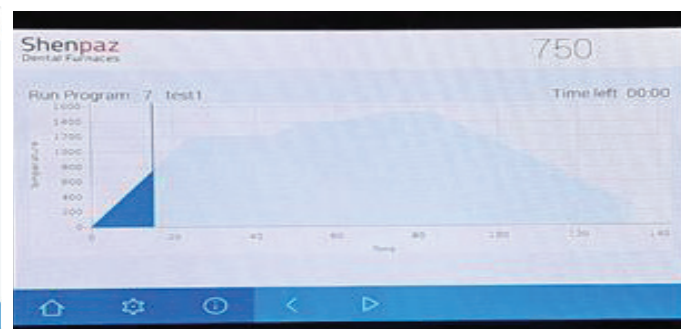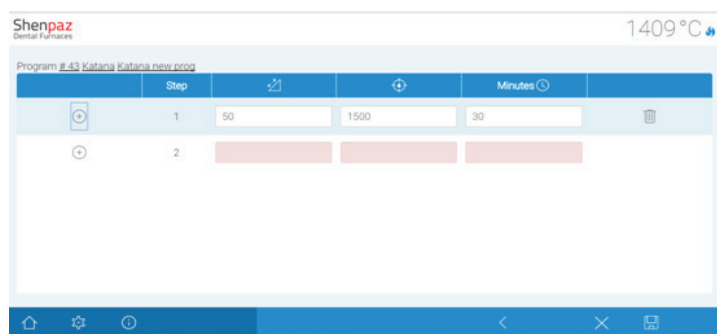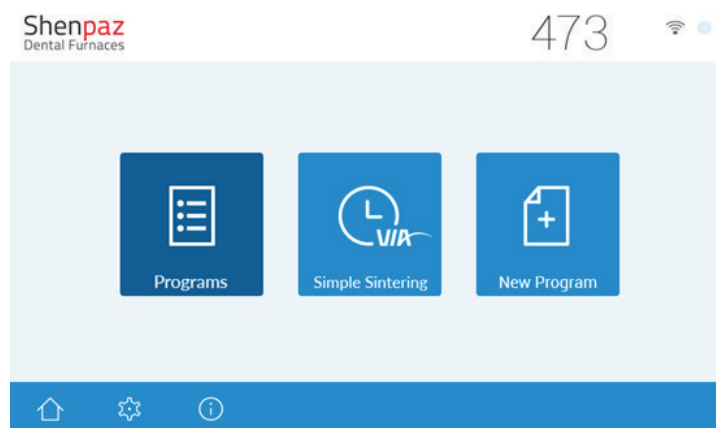



OdontoMega Importação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto, SP - CEP 14015-120
Telefone: (16) 3610.9636
odontomega@odontomega.com.br
www.odontomega.com.br