




ODONTOMEGA

POLIDORES

EVE

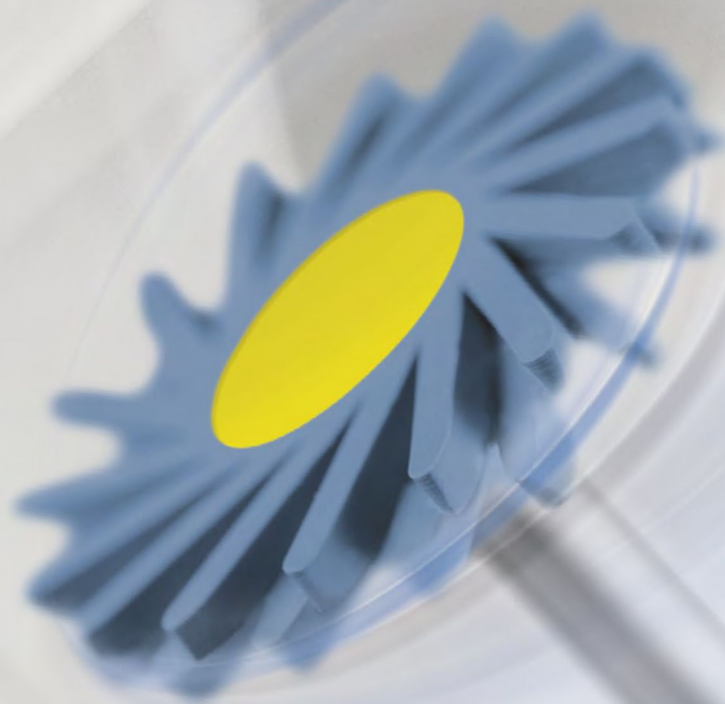

Nos polidores tipo Twist, o sentido da rotação deve ser o anti-horário. Caso contrário, o polidor pode ser danificado.



Não utilizar esterilização química.



Utilizar a rotação indicada para cada polidor. Caso contrário, o polidor pode ser danificado.



Todos os polidores são autoclaváveis. Não autoclavar as bases e tampas.



Os polidores possuem abrasivos diamantados, de óxido de alumínio ou carbeto de silício, não necessitando de pasta de polimento.



Utilizar sempre com equipamentos de proteção.