




Manual de operação

Gotejador Wax Pencil II

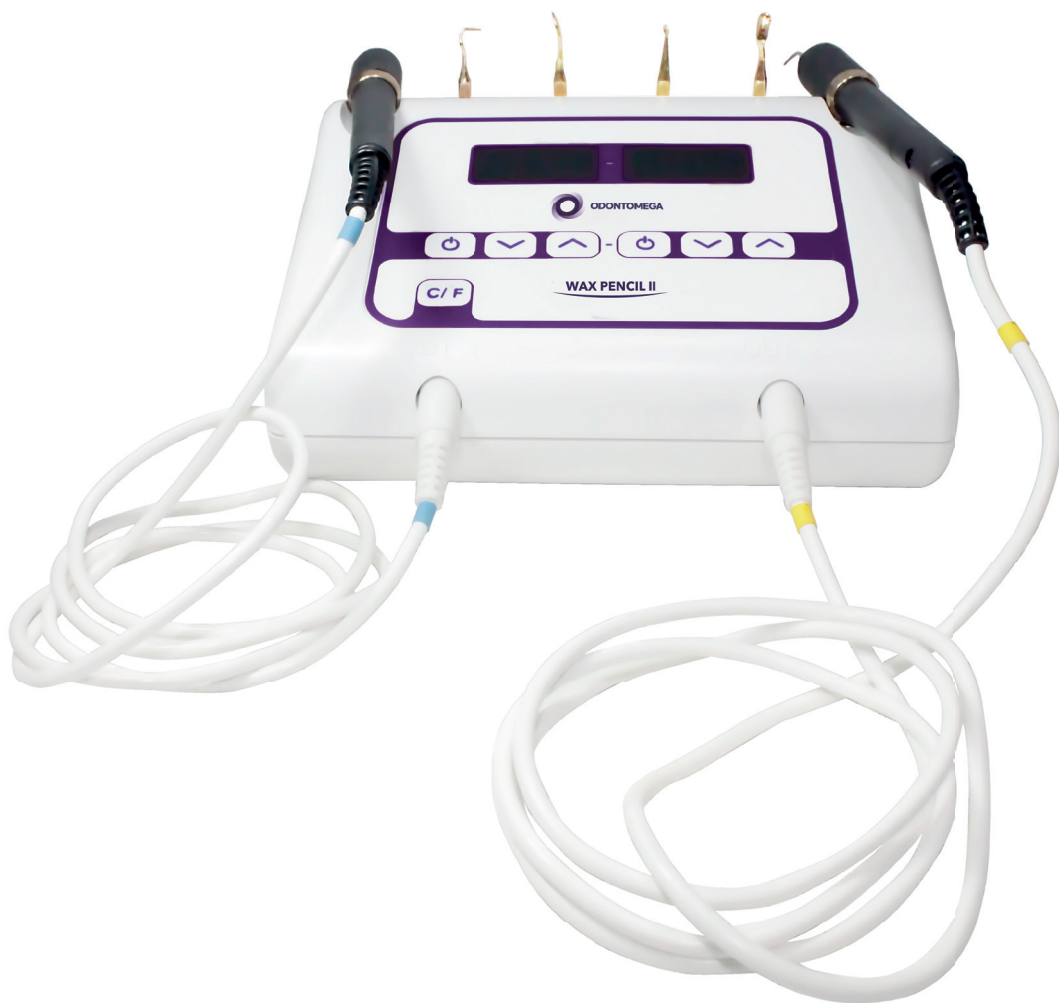



Código	Energia	AMP	Fusível	Temp.	Comprimento	Profundidade	Altura	Peso
09-301	Bivolt	20W	2A	50°C~200°C	152mm	123mm	70mm	0,56kg

Modo de uso



- Pressionar o botão lateral;



- Conectar a caneta no equipamento;



- Usando as teclas para Cima/Baixo, escolha a temperatura desejada. Para aumentar/diminuir rapidamente, mantenha as teclas pressionadas;



- Escolha o modo de exibição de temperatura em °C ou °F.

Em caso de problemas

Um sinal de erro aparecerá no visor e um aviso sonoro será disparado: Ligar e desligar o equipamento.

Precauções

Cuidado com a ponta da caneta, não tocar nela enquanto o equipamento estiver ligado ou logo após ser desligado. Esperar até resfriar para trocar a ponta.

- Não manejar com as mãos úmidas ou molhadas;
- Não desmontar o equipamento sem conhecimento técnico;
- Não deixar a ponta do equipamento tocar cabos de energia;
- Não usar o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada;
- Não bloquear a saída de ventilação na parte inferior do equipamento;

- Desconectar da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período;
- Não usar o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira;
- Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos, nos contatar imediatamente.

Garantia OdontoMega

Garantia Legal.

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.

Garantia Estendida

A OdontoMega garante a seus clientes, sempre produtos com altíssima qualidade, testados, em perfeitas condições e com certificação europeia CE. Deste modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.



Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120

E-mail: odontomega@odontomega.com.br

Telefone: (16) 3610-9636

Site: www.odontomega.com.br