



Manual de operação

## Imersor de Cera Multimega





Código	Energia	AMP	Fusível	Temp.	Comprimento	Profundidade	Altura	Peso
09-304	Bivolt	200W	5A	50°C~120°C	200mm	146mm	70mm	0,69kg

## Modo de uso



- Pressionar o botão lateral;



- Ao apertar um dos botões, o reservatório é ligado e a temperatura subirá até o nível desejado. Para desligar o reservatório basta apertar o botão novamente;



- Escolha o modo de exibição de temperatura em °C ou °F;



- A primeira linha indica a temperatura escolhida e a segunda linha indica a temperatura atual de cada reservatório;



- Para selecionar a temperatura desejada, pressione as teclas para Cima/Baixo. Para subir/descer a temperatura rapidamente, mantenha a tecla pressionada.

## Precauções

- Cuidado, não tocar no reservatório, evitando queimaduras;
- Não manejar com as mãos úmidas ou molhadas;
- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico;

- Não usar o equipamento com o cabo de força ou com a tomada danificados;
- Não dobrar ou esmagar o cabo de energia;
- Não bloquear a saída de ventilação na parte inferior do equipamento;
- Desconectar da energia em caso de tempestades de raios ou quando não for utilizar por um longo período;
- Não usar o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira;
- Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos, nos contatar imediatamente.

## Garantia OdontoMega

### Garantia Legal.

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.

### Garantia Estendida

A OdontoMega garante a seus clientes, sempre produtos com altíssima qualidade, testados, em perfeitas condições e com certificação europeia CE. Deste modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1• A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2• A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3• Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4• Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.



**Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120**

**E-mail: [odontomega@odontomega.com.br](mailto:odontomega@odontomega.com.br)**

**Telefone: (16) 3610-9636**

**Site: [www.odontomega.com.br](http://www.odontomega.com.br)**