

Instruções de uso • MegaGel •

MegaGel é um ácido em gel fosfórico de 37% condicionante, com fluidez ideal (altamente tixotrópico) para condicionar as propriedades e estruturas do dente, por exemplo, com a utilização da técnica adesiva, pode-se fazer vedação de fissuras com preenchimentos diretos em resina composta, cimentação de restaurações fabricadas em laboratório ou cimentação de elementos retenção ortodôntica.

Indicação

Condicionante para esmalte e dentina.

Aplicação recomendada

As áreas a serem condicionadas devem estar completamente isoladas.

- Recomenda-se o uso de lençol de borracha. Evitar qualquer contato direto com pele, boca, olhos, etc.
- Limpar o dente usando um polidor com pasta livre de flúor e oliosidade.
- Limpar cuidadosamente os resíduos do polimento utilizando água, secar a superfície do dente com ar comprimido livre de água e óleo.
- Preparar a cavidade de acordo. Enxaguar cuidadosamente a cavidade usando água e secar com ar comprimido livre de óleo e água.

Proteger a polpa em cavidades profundas (por exemplo, cobrir com uma camada fina de um material de revestimento de cavidade adequado). A cavidade deve estar seca e limpa.

Procedimento MegaGel

- Em primeiro lugar, aplicar o MegaGel nas margens do esmalte da cavidade e em seguida, se necessário, aplicar na dentina.

Tempo recomendado para reação

Esmalte: 20 à 60 segundos;

Dentina: Menor ou igual à 15 segundos;

Dentes com alto teor de fluoreto: 50 à 80 segundos.

- Em seguida, enxaguar por um mínimo de 20 segundos com água;
- Secar com ar comprimido livre de óleo e sem água.

A superfície condicionada não deve ser tocada ou contaminada com saliva antes da próxima fase de tratamento. Se houver contaminação, a superfície deve ser condicionada novamente (aproximadamente 10s.). O esmalte condicionado deve ter uma aparência branca calcária. Os adesivos, um adesivo de corrosão total, por exemplo, podem ser aplicados de acordo com as instruções do fabricante após serem condicionados.

Observação

- MegaGel provoca queimaduras;
- Evitar contato com a pele e os olhos. Se houver o contato, lavar com muita água. Consultar o médico.

Interações

O material de revestimento da cavidade pode ter um tempo de reação mais longo.

Efeitos colaterais

Não há conhecimento de efeitos colaterais até o momento. Em casos singulares, a hipersensibilidade aos componentes do material não podem ser excluídos. Evitar o contato do MegaGel com a pele. Se ocorrer contato acidental, lavar imediatamente com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com muita água e consultar um médico.

Composição

37% de ácido fosfórico, água e aerossil.

Armazenamento

Armazenar a temperatura ambiente normal, de 15 à 25 °C ou 59 à 77 °F. **Não usar após a data de validade.**

Tamanhos de produtos disponíveis

MegaGel
REF 07-504 - 1 seringa com 2ml.
Refil seringa com 50ml.

Manter afastado de crianças. Apenas para uso dentário.

