

LUNAR

Compo &
Compo PLUS

MAQUIAGEM 3D | MANUAL DO ÚSUÁRIO



RUA RUI BARBOSA, 640,
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14015-120

☎ 16 3610.9636

🌐 WWW.ODONTOMEGA.COM.BR

LUNAR Compo

Materiais fotopolimerizáveis para caracterização e glaze

Informações Gerais

O LUNAR Compo é uma solução fotopolimerizável para caracterização e glaze, desenvolvida para restaurações produzidas por compósitos, resinas acrílicas indiretas e objetos impressos em 3D. Permite que profissionais da odontologia obtenham excelente correspondência de cor e um acabamento de alto brilho, semelhante à dentina e ao tecido gengival naturais.

Finalidade

Para obter:

- Superfície lisa;
- Maior resistência ao desgaste;
- Aspecto natural das restaurações.

Indicações

Indicado para adicionar cor e brilho superficial em:

- Resinas compostas indiretas;
- Bases de próteses em resina acrílica;
- Objetos produzidos por impressão 3D.

Composições

- Acrilato multifuncional
- Iniciador
- Pigment.

Precauções

1. Inspeção o produto para verificar a presença de partículas estranhas, impurezas ou defeitos físicos.
2. Não utilize o produto após o prazo de validade.
3. Feche imediatamente o frasco ou a seringa após o uso para evitar contaminação por poeira e umidade.
4. Leia atentamente o manual de instruções e siga as orientações do fabricante.

Preparação antes do uso

1. Após o acabamento da restauração, realize o polimento da superfície utilizando uma broca de carbeto ou uma ponta de silicone de granulação grossa.
2. Limpe a superfície com spray de água ou um limpador a vapor e seque completamente.

Modo de Uso

Dispense uma pequena quantidade do produto em uma paleta. Se desejar diluir, utilize o LUNAR Compo Glaze (Clear) ou o LUNAR Compo Clear. Misture delicadamente para evitar a formação de bolhas. Aplique o produto com um pincel. Cure cada camada com uma unidade fotopolimerizadora para atingir a tonalidade desejada durante 30–60 segundos. Aplique uma fina camada de LUNAR Compo Glaze e realize a fotopolimerização utilizando equipamentos UV (ex.: Twin Cure: 5 minutos).

Sequência de aplicação (opcional):

- Caracterização → Glaze
- Glaze
- Glaze → Caracterização

Armazenamento e conservação após o uso

1. Não reutilize o material remanescente na paleta após a mistura.
2. Após o uso, feche imediatamente a tampa do frasco ou da seringa.
3. Armazene longe de altas temperaturas, luz solar direta e ambientes com alta umidade.

Contraindicações

Evite o uso em pacientes com alergia conhecida a:

- Acrilatos;
- Monômeros de metacrilato;
- Polímeros de acrilato ou metacrilato.

As reações podem variar de leve irritação a anafilaxia grave.

Armazenamento

Para melhor desempenho, conservar entre 2 °C e 27 °C.

Cuidados

1. Produto exclusivo para uso odontológico.
2. Utilizar apenas em ambiente bem ventilado.
3. Utilize luvas, óculos de proteção e máscara.
4. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água. Se houver contato com os olhos, enxágue abundantemente e procure atendimento médico.

Unidades de Venda

Componetes	
Kit Pro	LUNAR Compo Glaze 5 frascos de 2 ml Cores: Clear, Clear Fluo LUNAR Compo 3 frascos de 15 seringas (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Grey, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red)
Refil	LUNAR Compo Glaze 5 frascos (Clear ou Clear Fluo) LUNAR Compo 3g Cores: (Clear, Shade A, Shade B, White, Orange, Copper, Brown, Light Grey, Grey Blue, Purple Grey, Light Pink, Pink, Dark Pink, Light Red, Red, Dark Red)

Aviso Legal

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso industrial/odontológico. Deve ser utilizado conforme as instruções de uso. A MEDIFIVE Co., Ltd. reconhece sua responsabilidade apenas pela substituição de produtos comprovadamente defeituosos. A empresa não se responsabiliza por danos diretos ou indiretos decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilização deste produto. Antes da utilização, é responsabilidade do usuário verificar a adequação do produto à finalidade pretendida e assumir todos os riscos e responsabilidades relacionados ao seu uso.


Simbolos



Fabricante



Consultar instruções de uso

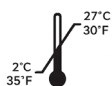

Limite de temperatura



Número do Lote



Data de validade



Manter protegido da luz solar



Atenção



Data de fabricação