



Manual de operação

## Imersor de Cera Unimega





| Código | Energia | AMP | Fusível | Temp.      | Comprimento | Profundidade | Altura | Peso   |
|--------|---------|-----|---------|------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 09-303 | Bivolt  | 60W | 2A      | 50°C~120°C | 108mm       | 137mm        | 70mm   | 0,69kg |

## Modo de uso



- Conectar o cabo de força;



- Pressionar o botão lateral;



- Escolha o modo de exibição de temperatura em °C ou °F;



- Para selecionar a temperatura desejada, pressione as teclas para Cima/Baixo. Para subir/descer a temperatura rapidamente, mantenha a tecla pressionada;



- A temperatura selecionada é indicada por S e a temperatura atual é indicada por C;



- Quando o equipamento estiver em aquecimento, o LED ficará piscando. Quando chegar na temperatura selecionada, o LED apagará.

## Precauções

- Cuidado, não tocar no reservatório, evitando queimaduras;
- Não manejar com as mãos úmidas ou molhadas;
- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico;
- Não usar o equipamento com o cabo de força ou com a tomada danificados;
- Não dobrar ou esmagar o cabo de energia;

- Não bloquear a saída de ventilação na parte inferior do equipamento;
- Desconectar da energia em caso de tempestades de raios ou quando não for utilizar por um longo período;
- Não usar o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira;
- Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos, nos contatar imediatamente.

## Garantia OdontoMega

### Garantia Legal.

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1•** A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2•** A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3•** Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4•** Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.

## Garantia Estendida

A OdontoMega garante a seus clientes, sempre produtos com altíssima qualidade, testados, em perfeitas condições e com certificação europeia CE. Deste modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1•** A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural das partes;
- 2•** A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3•** Seguir as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4•** Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega dentro do período de garantia legal.





**Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120**

**E-mail: [odontomega@odontomega.com.br](mailto:odontomega@odontomega.com.br)**

**Telefone: (16) 3610-9636**

**Site: [www.odontomega.com.br](http://www.odontomega.com.br)**

