

Elastic Gum

Silicone de adição escaneável e Indicado para a reconstrução completa dos contornos gengivais ao redor do preparo no modelo.

 Instruções de uso

www.odontomega.com.br

 MEDIFIVE Co.,Ltd

Importado por Odontomega R Rui Barbosa, 640 - Ribeirão Preto
- SP CNPJ: 01.380.483/0001-60 Resp. Técnica: Themis Aider
CRM 22380, Registro ANVISA: 10352049020
Tel.: (16) 3610-9636 WhatsApp (16) 3610-9636

Descrição do produto

Elastic Gum é um material de moldagem dentária de baixa viscosidade, para duplicar modelos para laboratório odontológico. Goma elástica é usado para a reconstrução dos contornos completos do gengiva ao redor da preparação no modelo.

Composição

Vinil polissiloxano, Polissiloxano hidrogenado, Carga, Pigmentos, Aditivo, catalisador de platina

Informações técnicas

Tempo total de trabalho: 2' 30"
Tempo de secagem: 7' 00"
Recuperação da deformação: 99%
Alteração dimensional linear após 24 horas: 0,2%
Dureza (Shore A): 55±2

Como usar

- (1) Enxaguar a moldagem com água corrente e morna.
- (2) Colocar o cartucho na pistola de moldagem. Dispensar uma pequena quantidade do material antes de instalar a ponta misturadora, para garantir um fluxo uniforme de ambos os lados do cartucho.
- (3) Injetar a mistura de Elastic Gum na área a ser reconstruída, cobrindo todo o contorno da região gengival. No caso de implantes, injetar Elastic Gum de forma suficiente sobre o análogo de laboratório.
- (4) Após a presa da moldagem, vaziar o modelo utilizando materiais como gesso, entre outros.
- (5) Após a presa final, remover o material do modelo.
- (6) Verificar a reconstrução completa dos contornos da região gengival no modelo.

Como armazenar e gerenciar após o uso

- (1) Manter e armazenar em local fresco (2-24°C).
- (2) Fechar a tampa rápida e firmemente após o uso.
- (3) Evitar contato com o ar.

Cuidado

- (1) O Elastic Gum deve ser utilizado por dentistas e profissionais da odontologia, mantendo-o fora do alcance de pessoas não habilitadas, incluindo crianças, idosos e outros.
- (2) No caso de contato ou mistura do Elastic Gum com silicones de polimerização por condensação, materiais de moldagem à base de polissulfeto, materiais que contenham eugenol, luvas de exame de látex, umidade e glicerol, cosméticos, entre outros, pode ocorrer atraso na polimerização ou superfície irregular do Elastic Gum. Caso haja resíduos acrílicos ou metacrílicos, limpar a superfície dentária afetada com álcool isopropílico antes de realizar a moldagem. Limpar e secar completamente as mãos antes de utilizar o Elastic Gum.
- (3) Não deixar o Elastic Gum entrar em contato nem verter sobre soluções ou líquidos orgânicos.
- (4) O Elastic Gum não deve ser utilizado em pacientes com histórico de hipersensibilidade, erupção cutânea, dermatite, entre outros, à silicone.
- (5) Deve-se evitar a exposição da Base, do Catalisador e da mistura à pele e aos olhos. Em caso de contato com os olhos, consultar um oftalmologista.
- (6) Para cada variação de 1°C na temperatura, para mais ou para menos, o tempo de trabalho pode aumentar ou diminuir em 15 segundos.
- (7) Não compartilhar nem trocar as tampas da Base e do Catalisador, pois isso causará contaminação cruzada entre os materiais.
- (8) Deve-se tomar cuidado para que o material não entre em contato com roupas, pois é difícil de remover após a presa.
- (9) Não utilizar após a data de validade.
- (10) A condição de temperatura de armazenamento antes do uso pode causar atraso ou redução no tempo de trabalho. O material deve atingir a temperatura ambiente antes de ser utilizado.
- (11) Uso exclusivamente odontológico. Observar o procedimento e as precauções indicadas.

Unidades de Venda

Embalagem	Componentes
Plástica	Cartucho de goma elástica 50 ml x Unidade

Garantia

A MEDIFIVE Co., Ltd. garante que este produto estará livre de defeitos de material e fabricação. A MEDIFIVE Co., Ltd. não oferece outras garantias, incluindo qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Limitação de responsabilidade

A MEDIFIVE Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso do produto descrito. Antes de usar o produto, é responsabilidade do usuário determinar sua adequação. Substituiremos o produto que apresentar defeito comprovado dentro do período de garantia.

Símbolos

	Fabricante		Temperado limite		Consulte as instruções de uso.		Data de validade		Código do lote
--	------------	---	------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	----------------