


Resina especial para impressoras LCD e DLP, com alta fidelidade e característica especial:  
**Mais rápida na eliminação no forno de anel.**

O nível de detalhamento desta resina é excelente, ela possui a resolução de **50 a 100 microns**.  
Com uma unidade da resina, você consegue fazer aproximadamente **500 coroas**.



**Economia de tempo! A PrintaX Press & Cast Green é eliminada no forno em 1h30min.**  
**Outras resinas podem ser mais de 2h30min.**

## Especificações:

- Viscosidade: 200mPa.S;
- Densidade: 1.1 g/cm<sup>3</sup>;
- Dureza da superfície (Shore D): 75D;
- Elasticidade: 850MPa;
- Resistência: 65 MPa.

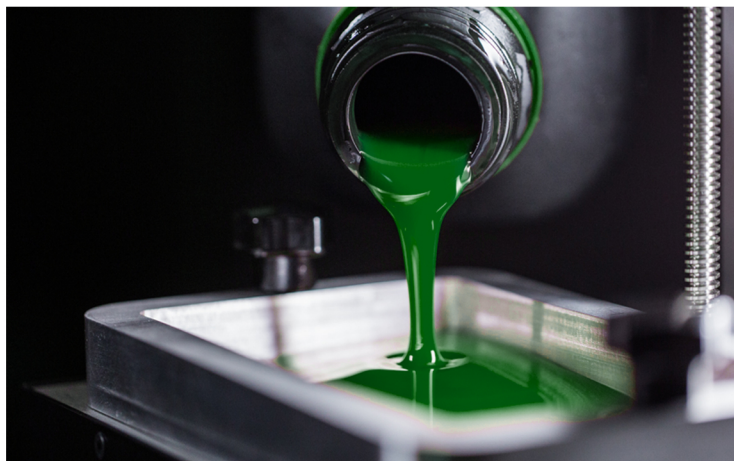

## Tabela de eliminação de resina PrintaX Press & Cast Verde

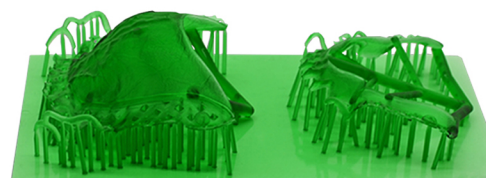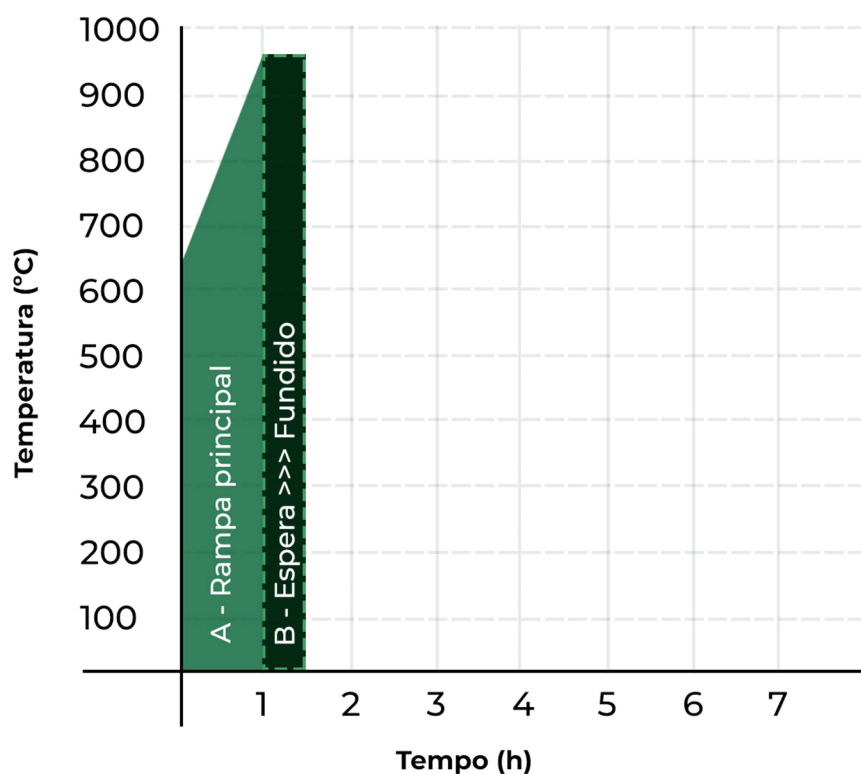

**Cód.: 21-406**  
**Conteúdo do frasco: 0,5kg**

1. Anel pode ser colocado em forno quente em até 500°C.
2. Subir a temperatura até 950°C em 1h30 (8°C/min).
3. Manter em 950° por 30 minutos.
4. Tempo total, 1h30.



**ODONTOMEGA**