


SUPER SCOPE

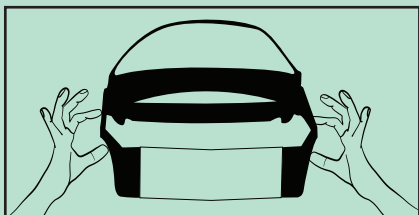

CUIDADO

Quando manusear a lupa Super Scope, segure com ambas as mãos nas hastes laterais.

NUNCA SEGRE DIRETAMENTE NALENTE

Atenção

Precauções

1. Manter o produto em local seco e limpo com temperatura entre 10°C - 40°C.
2. Manter o produto livre de pó e sujeira, deixando a lente protegida quando não estiver sendo utilizado.
3. Não tocar nas lentes, pois as digitais são difíceis de serem limpas.
4. Não derrube ou cause qualquer dano físico.
5. Remover sempre utilizando as duas mãos.
6. Sempre segurar o produto pelas hastes e não pela lente.
7. **Nunca utilizar "Super Bonder".**

Higienização e Limpeza

- Utilizar sempre flanela seca para limpeza das lentes.
- Não esterilizar no ultrassom.
- Não utilizar produtos de limpeza.
- Não lavar.
- Não expor o produto a altas temperaturas.

Como utilizar

- Retirar cuidadosamente a lupa da embalagem segurando-a pelas hastes laterais.
- Com a lupa apoiada, iniciar os ajustes das tiras superiores e laterais.
- Centralizar a peça acima da cabeça e finalizar os ajustes para que fique presa de modo a não se soltar facilmente.
- Com ambas as mãos, ajustar a lente à frente dos olhos, adequando o melhor posicionamento de visibilidade, caso utilize óculos, esteja de uso do mesmo para melhor adaptação.
- Fixar o olhar a um objeto fixo para adaptar-se ao seu campo de trabalho e distância focal.
- Parabéns você está pronto para utilizar a Lupa Super Scope.

Garantia legal

Este produto possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da data de emissão da Nota fiscal, de acordo com o que determina o código de defesa do consumidor. Observar as seguintes condições:

1. A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o de desgaste natural e danos por má utilização.
2. A garantia cobrirá a reposições de peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento da lupa sem que seja necessária a troca de toda a peça.
3. Leia atentamente o manual de instrução e utilização do mesmo, a utilização inadequada, a venda por terceiros, manutenção por profissionais não autorizados, acarretará a perda imediata da garantia.

OdontoMega Import. Rua: Rui Barbosa, 640
CEP: 14015-120 | Ribeirão Preto - SP
CNPJ: 01.380.483/0001-60 - I.E: 582427898117
Tel.: (16) 3610-9636
e-mail: odontomega@odontomega.com.br
www.odontomega.com.br



ODONTOMEGA