

Aplicação de Opaco

Ao trabalhar o sistema cerâmico InSync em coping e estrutura de titânio, realizar a seguinte operação antes da aplicação de massas cerâmicas.

1. Jatear a superfície inteira da peça. Neste processo, faíscas serão emitidas devido ao contato do titânio com o óxido de alumínio. Realizar o processo até que a peça não emita mais nenhuma faísca.
2. Após o jateamento, o técnico tem 15 minutos para aplicar o opaco. Se demorar mais de 15 minutos, deverá repetir o processo nº1.
3. Após a aplicação de opaco, a peça não irá oxidar, então a cerâmica pode ser aplicada normalmente, mesmo depois de muito tempo na bancada.

Opaco disponível nas cores:

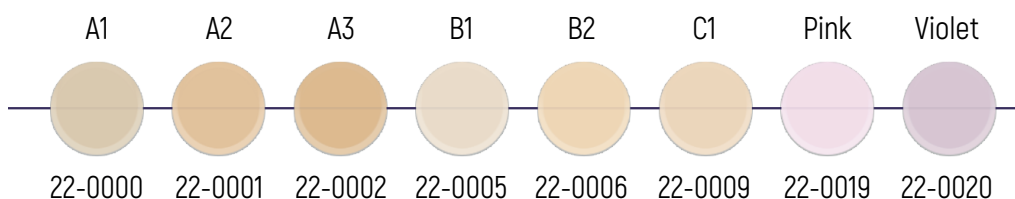


Tabela de queima

	T1 (C°)	Secagem (min)	Elevação (min)	T2 (C°)	Vácuo (C°)	Taxa de calor (C°/min)	T3 (C°)	Fim Vácuo (C°)	Manutenção (min)	Descida (min)
Queima de opaco	400	4	2	450	450	55	800	800	2	1
1ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	800	800	1	1
2ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	790	790	1	1
1ª Queima de Dentina	400	4	2	450	450	45	740	740	1	1
2ª Queima de Dentina	400	4	2	450	450	45	730	730	1	1
1ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	700	700	1	1
Correção	400	6	2	600	600	45	730	730	1	1
Queima de stains	400	4	-	450	-	45	735	-	1	1
Glaze sem pasta	400	6	2	600	600	45	730	730	1	1

Quaisquer dúvidas, entre em contato com a equipe OdontoMega.

☎ (16) 3610.9636


📞 (16) 9 9404.2888

🌐 odontomega.com.br


✉ odontomega@odontomega.com.br

Cores disponíveis


DENTIN

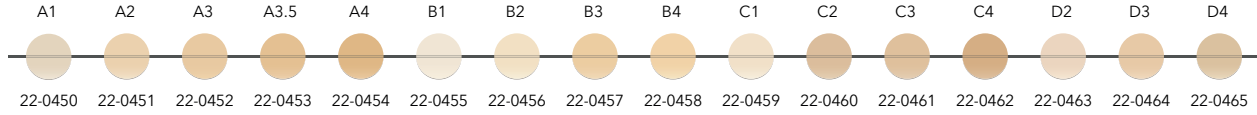


OPACIOUS DENTIN

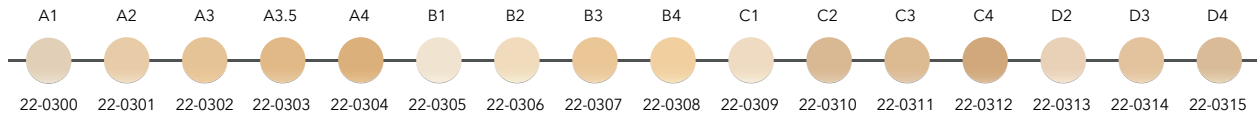


DENTIN BLEACH - CLAREADOS

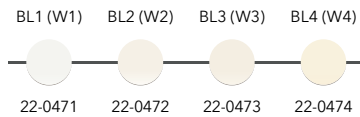


ENAMEL - INCISAL

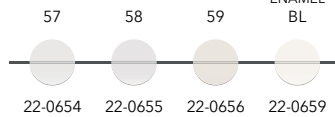


TRANSPARENTE

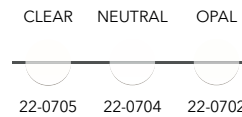


CORRECTION

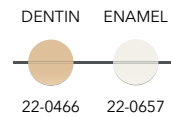


EFFECT ENAMEL - INCISAL

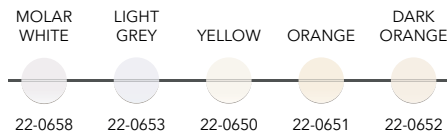


MAMELOS

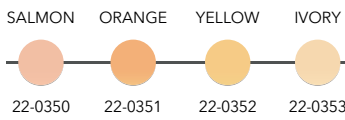


NECK TRANSPA - CERVICAL

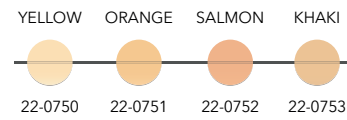


TRANSLUCENT

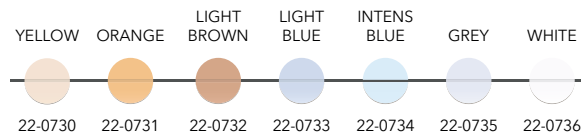


GINGIVAL

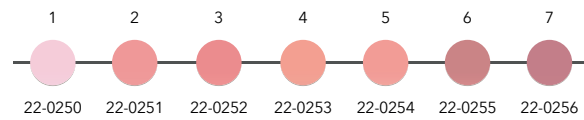

SHADES

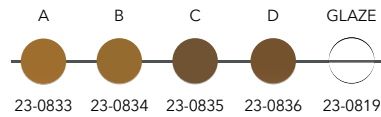

ZR LINER

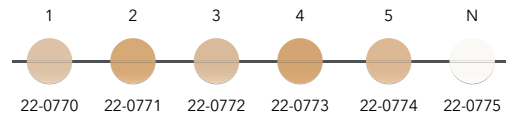

STAINS

