

LUNAR COMPO

MAQUIAGEM 3D | MANUAL DO ÚSUÁRIO



 (16) 3610-9636

 WWW.ODONTOMEGA.COM.BR

LUNAR Compo

Materiais fotopolimerizáveis para caracterização e glaze

Informações Gerais

O LUNAR Compo é uma solução fotopolimerizável para caracterização e glaze, desenvolvida para restaurações produzidas por compósitos, resinas acrílicas indiretas e objetos impressos em 3D. Permite que profissionais da odontologia obtenham excelente correspondência de cor e um acabamento de alto brilho, semelhante à dentina e ao tecido gengival naturais.

Finalidade

Para obter:

- Superfície lisa;
- Maior resistência ao desgaste;
- Aspecto natural das restaurações.

Indicações

Indicado para adicionar cor e brilho superficial em:

- Resinas compostas indiretas;
- Bases de próteses em resina acrílica;
- Objetos produzidos por impressão 3D.

Composições

- Acrilato multifuncional
- Iniciador
- Pigment.

Precauções

1. Inspeção o produto para verificar a presença de partículas estranhas, impurezas ou defeitos físicos.
2. Não utilize o produto após o prazo de validade.
3. Feche imediatamente o frasco ou a seringa após o uso para evitar contaminação por poeira e umidade.
4. Leia atentamente o manual de instruções e siga as orientações do fabricante.

Preparação antes do uso

1. Após o acabamento da restauração, realize o polimento da superfície utilizando uma broca de carbeto ou uma ponta de silicone de granulação grossa.
2. Limpe a superfície com spray de água ou um limpador a vapor e seque completamente.

Modo de Uso

Dispense uma pequena quantidade do produto em uma paleta. Se desejar diluir, utilize o LUNAR Compo Glaze (Clear) ou o LUNAR Compo Clear. Misture delicadamente para evitar a formação de bolhas. Aplique o produto com um pincel. Cure cada camada com uma unidade fotopolimerizadora para atingir a tonalidade desejada durante 30–60 segundos. Aplique uma fina camada de LUNAR Compo Glaze e realize a fotopolimerização utilizando equipamentos UV (ex.: Cure V2: 5m 30s).

Sequência de aplicação (opcional):

- Caracterização → Glaze
- Glaze
- Glaze → Caracterização

Armazenamento e conservação após o uso

1. Não reutilize o material remanescente na paleta após a mistura.
2. Após o uso, feche imediatamente a tampa do frasco ou da seringa.
3. Armazene longe de altas temperaturas, luz solar direta e ambientes com alta umidade.

Contraindicações

Evite o uso em pacientes com alergia conhecida a:

- Acrilatos;
- Monômeros de metacrilato;
- Polímeros de acrilato ou metacrilato.

As reações podem variar de leve irritação a anafilaxia grave.

Armazenamento

Para melhor desempenho, conservar entre 2 °C e 27 °C.

Cuidados

1. Produto exclusivo para uso odontológico.
2. Utilizar apenas em ambiente bem ventilado.
3. Utilize luvas, óculos de proteção e máscara.
4. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água. Se houver contato com os olhos, enxágue abundantemente e procure atendimento médico.

Aviso Legal

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso industrial/odontológico. Deve ser utilizado conforme as instruções de uso. A MEDIFIVE Co., Ltd. reconhece sua responsabilidade apenas pela substituição de produtos comprovadamente defeituosos. A empresa não se responsabiliza por danos diretos ou indiretos decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilização deste produto. Antes da utilização, é responsabilidade do usuário verificar a adequação do produto à finalidade pretendida e assumir todos os riscos e responsabilidades relacionados ao seu uso.


Simbolos



Fabricante



Consultar instruções de uso

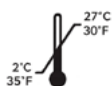

Limite de temperatura



Número do Lote



Data de validade



Manter protegido da luz solar



Atenção



Data de fabricação