

TrueColor

Líquido para visualizar a cor real da cerâmica, antes de queimar

Modo de usar:

- 1- Remover o corante da cerâmica

Queimar o pó da cerâmica no forno de cerâmica, utilizando os seguintes parâmetros:

Temperatura Inicial = Temperatura Inicial da Cerâmica

Temperatura Final = Temperatura Inicial da Cerâmica

Tempo de Queima = 5 minutos

Taxa de subida de calor = 30°C/min

Sem vácuo

- 2- Pronto. A cerâmica já pode ser misturada ao TrueColor, e assim ela vai adquirir a coloração de quando for queimada.
- 3- Importante, não misturar com água, portanto ao aplicar a cerâmica molhar sempre o pincel ao líquido TrueColor ou secar bem o pincel.
- 4- Antes de realizar a queima, o TrueColor deve ser secado. Para eliminar o líquido, posicione o elemento no forno aberto com a temperatura inicial por 10 minutos. Após esse período já é possível realizar a queima da cerâmica com certeza total da cor esperada.